



HEMATURIA DETECTION

technology by
blücare




DO WYKRYWANIA KRWIOMOCZU U KOTÓW

WSKAZANIA

Produkt **HEMATURIA DETECTION** pomaga wykrywać obecność krwi w moczu kota, która jest objawem większości zaburzeń układu moczowego u kotów. Produkt **HEMATURIA DETECTION** występuje w postaci małych, białych granulek, które można łatwo rozsypać na żwirku kota.

INSTRUKCJA UŻYCIA

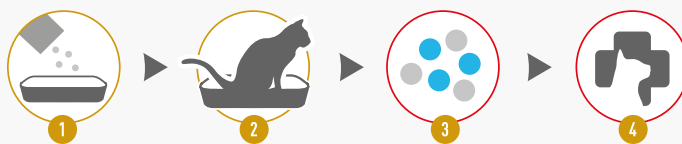

- 1 Upewnij się, że kuweta jest czysta i wypelniona żwirkiem.
- 2 Równomiernie rozprowadź jedną saszetkę granulek **HEMATURIA DETECTION** po żwirku.
- 3 Obserwuj granulki, które miały kontakt z moczem kota przez następne 24-48 godzin.
 - a) Jeśli granulki są **BIAŁE** lub **ŻÓŁTE**, wynik testu jest negatywny i nie wykryto krwi w moczu.
 - b) Jeśli granulki są **NIEBIESKIE**, wynik testu jest pozytywny i wykryto krew w moczu kota. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii.
 - c) Jeśli nie masz pewności co do koloru granulek, usuń wszystkie granulki i powtórz czynności opisane powyżej.
- 4 Jeśli nadal nie masz pewności co do koloru granulek lub jeśli kot wykazuje jakiegokolwiek niepokojące objawy, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Granulki **HEMATURIA DETECTION** powinny być stosowane z częstotliwością zaleconą przez lekarza weterynarii.



PROSTY W UŻYCIU

Łatwy do zastosowania dodatek do żwirku.*



SZYBKI

Wynik uzyskujemy w ciągu kilku sekund.



WYRAŹNY

Wynik pozostaje widoczny przez 48 godzin.



OGRA NICZA STRES

Badanie przeprowadza się w warunkach domowych.



BEZPIECZNY

Wykonany przy użyciu bezpiecznych surowców.



WIARYGODNY

Umożliwia wykrycie nawet śladowych ilości krwi w moczu (mikrohematuria), niewidocznych „gołym okiem”.



ŁATWY DO PRZECHOWYWANIA

Opakowanie zawiera dwie, 20-gramowe saszetki granulek.

SKŁAD

Granulki **HEMATURIA DETECTION** zawierają tetrametylobenzydynę (TMB), związek zbadany przez lekarzy weterynarii, który powoduje zmianę koloru granulek z białego na niebieski, po kontakcie z hemoglobina.

Opakowanie: 40 g [2 saszetki 20 g]

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uważnie zapoznaj się z instrukcją przed wykonaniem testu, ponieważ wyniki mogą być prawidłowo zinterpretowane tylko wtedy, gdy dokładnie wykonano zalecenia i wskazówki z instrukcji. Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Nie używać, jeśli saszetka jest otwarta lub uszkodzona. Umieść kuwetę kota w przewiewnym pomieszczeniu. Zadbaj o codzienne usuwanie grudek i odchodów używając łopaty do żwirku. Umyj ręce mydłem po rozprowadzeniu i usunięciu granulek. Do użytku zewnętrznego. Nie połkać. Przechowuj granulki w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i chroń przed słońcem. Usuwać granulki tak samo jak inne odpady.

* Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, zaleca się stosowanie granulek Hematuria Detection na zbrylające się żwirki bentonitowe.